



児玉先生お勧め、「COE-PAK」の取扱法

COE-PAKのご紹介



児玉先生のお勧めは、HARD&FASTです。
ハードタイプ以外は柔らかすぎて操作性が
悪いそうです。

左：HARD&FAST SET（緑）
右：REGULAR SET（ピンク）

画像はこちらからお借りしました。

<http://www.gceurope.com/products/detail.php?id=61>

◇COE-PAK以外に用意するもの

：ワセリンもしくはココアバター
分離剤として使用

：精製水もしくは水道水
表面の硬化に使用

：ガーゼ
歯面に押し付けるために使用

：生理食塩水



販売元：松風

使用手順

手順

1. 「COE-PAK HARD&FAST」を錬和します。
2. 錬和後、精製水もしくは水道水に10秒間浸します。
表面が固まり成形しやすくなります。
3. 「COE-PAK」を設置面に適するように成形します。
グローブにワセリンもしくはココアバターを塗布すると、「COE-PAK」が
グローブにべとつきません。
4. 生理食塩水に浸したガーゼを介在させて、歯面に押しつけます。