



Sinus jo5のご紹介

症例提供：上田 秀明先生

商品概要・構成



ソケットリフト時に補填材の散乱を防止して、補填材の無駄をなくします。


商品構成

Sinus jo5右側用×1個


Sinus jo5右側用×1個

スプーンインスツルメント×1本

使用例

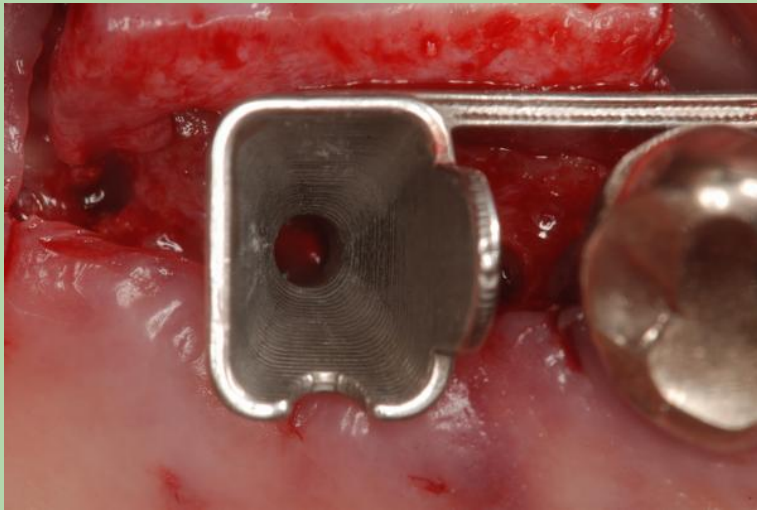


Sinus jo5右側用
頬側からアプローチして、ソケット内に器具の先端を添わせます。

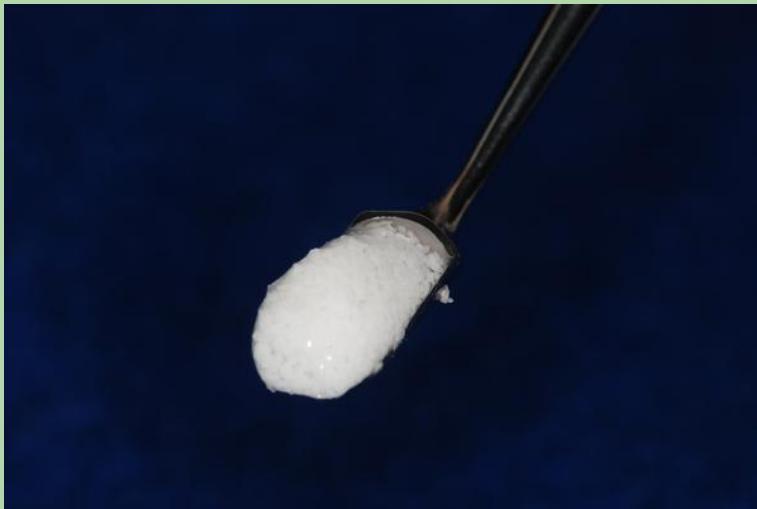

専用両頭インスツルメントのスプーン部分を利用して、jo5の開口部まで運びます。

使用例

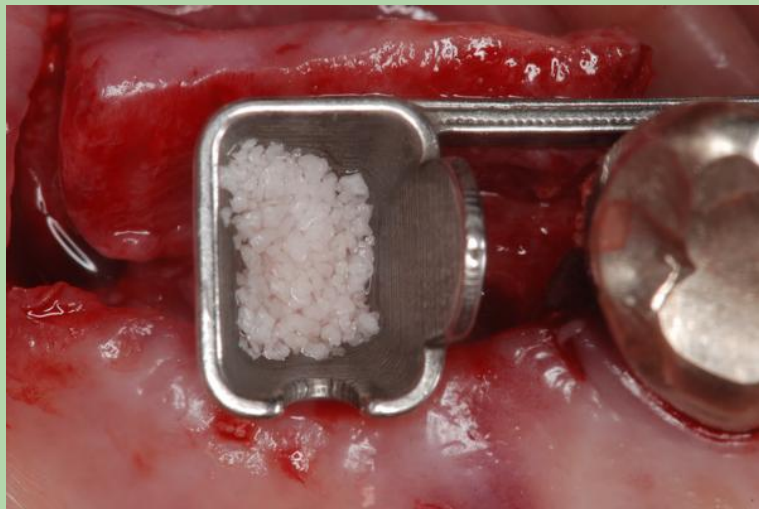

Sinus jo5右側用
補填材を開口部内へ注入。



専用両頭インスツルメントの充填器を
利用して、ソケット内に押込みます。

使用例



必要に応じて骨補填材を追加して、同様の作業を繰り返します。

Merit！！

- ①補填材の散乱を防止し、感染を防ぎます。
- ②補填材を効率良く填入出来時間短縮につながります。
- ③高価な補填材の無駄をなくしコスト削減に役立ちます。