


AQB 1 ピース / T タイプ		
インプラント直径	ファイナル OAM 径（リーマー相応）	備考
3mm	2.8mm	AQB インプラントの特徴として、スクリューは付与されていますが、シリンダータイプとして設計されています。 骨頂部を飛ばさない工夫として、付属のフィンガードライバーにリーマーを装着してインプラント窩を形成してください。
4mm	3.8mm（リーマー径φ3.9）	
5mm	4.8mm	
AQB 2 ピース		
インプラント直径	ファイナル OAM 径（エンドミルリーマー相応）	備考
4mm	3.6mm or 3.8mm（エンドミルリーマー径φ3.75）	同上
5mm	4.6mm	

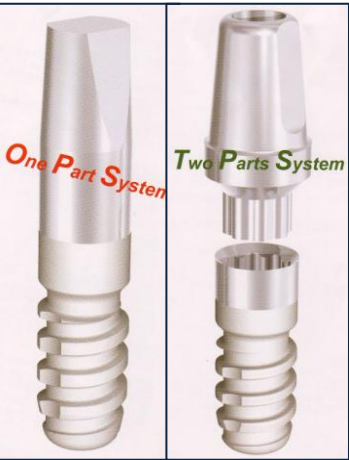

AQB インプラントの先端形状とオーギュメーターの形状は不一致です。

先端部形状をリーマー、エンドミルリーマーで形成する代用品として、トレフィンバーのご利用をお勧めします。（※）

オーギュメーターの挿入がインプラント長まで達しない場合、側面部に刃が付与されていないトレフィンバーを使用すると骨頂部の裂開が防止できます。

また、海綿骨を採取することができるため、骨補填材として利用することができます。

（※） 4mm、5mm の場合。3mm にはφ2.8 のトレフィンバーをご利用ください。

参考商品：K-SYSTEM KS3.2mm セット
販売：(株)メディカルエイペックス
価 格：58,500 円（税抜き）

◇ブレード着脱には、専用ドライバーがあると便利です。
商品名：ドライバー 価格：3,000 円（税抜き）

インプラント長まで挿入できない場合、骨頂部のみ拡大してインプラント長まではトレフィンバーをご利用ください。

無注水による削合ができますので、採取した骨を使用することも可能です。



当資料は(株)メディカルエイペックスが外科マニュアル、ユーザーからの情報を基に作成いたしました。