


アストラテック・デンタルインプラント

	ファイナル OAM 径 パイロットドリル相応	骨質が硬い場合 コーティカル ドリル相応	1st ステップ コニカル ドリル相応	2st ステップ コニカル ドリル相応	3st ステップ コニカル ドリル相応	備考
3.5 / 8~	OAM φ 3.2	OAM φ 3.4	—	—	—	インプラント長までは、メーカー指定のツイストドリル（最終）を使用してください。
4.0ST / 8~	OAM φ 3.6 or φ 3.8	OAM φ 3.8	—	—	—	同上
4.5ST / 9~	OAM φ 3.2	OAM φ 3.4	OAM φ 3.6 深度 6mm	OAM φ 3.8 深度 6mm	OAM φ 3.8 を使用して φ 4.0 程度まで円錐運 動作業	コニカルドリル使用で裂開の恐れがない場合は、コニカルドリルを使用してマイクロスレッド部の形状に合わせてください。
5.0ST / 9~	OAM φ 3.6 or φ 3.8	OAM φ 3.8	OAM φ 4.0 深度 6mm	OAM φ 4.2 深度 6mm	OAM φ 4.2 を使用して φ 4.5 程度まで円錐運 動作業	同上

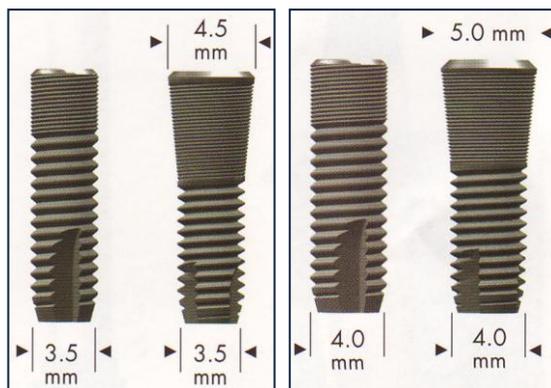


ST45、ST50 はマイクロスレッド部分の円錐形状を、オーギュメーター6mm（インジケーター1番目）まで挿入して骨頂部付近を拡大しながら形成（円錐運動）する必要があります。

円錐運動のイメージは、下図のコニカルドリルの形状に合わせてください。

各ドリルを使用する際に、拡大した骨頂部の裂開防止にはマニュアルドライバー（※1）の使用をお勧めします。

ただし、アストラテックの先端部は平面のためマニュアルドライバーでは硬くて形成ができない場合もあります。

その場合には側面部に刃が付与されていない、トレフィンバー（※2）を使用すると骨頂部の裂開が防止できます。

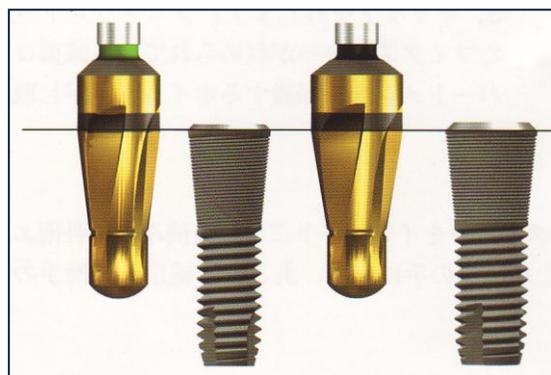

参考商品（詳細はお問合わせください。）

※1

商品名：2次オペ用ボーンカウンターツールマニュアルドライバー

販売：白鵬

価格：9,200円（参考価格）

※2

商品名：K-SYSTEM KS3.2mm セット

販売：(株)メディカルエイペックス

価格：58,500円（税抜き）



当資料は(株)メディカルエイペックスが外科マニュアル、ユーザーからの情報を基に作成いたしました。