

バイコン デンタルインプラント		
インプラント直径	ファイナル OAM 径 ≧ラッチリーマー径	備考
3.5mm	OAM φ 3.4	：パイロットドリル 2.0mm ： ラッチリーマー2.5mm ～ ：最終ラッチリーマー 上記工程をオーギュメーターで代用します。 
4.0mm	OAM φ 4.0	
4.5mm	OAM φ 4.4	
5.0mm	OAM φ 5.0	
6.0mm	設定なし	
		左からパイロットドリル 2.0mm、ラッチリーマー2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm、6.0mm



バイコンインプラントはシリンダータイプです。スクリューによる初期固定タイプではありませんので、ファイナル OAM 径は指定のラッチリーマーより小径もしくは同径になります。

バイコンインプラントの先端形状とオーギュメーターの形状は不一致です。先端部形状をインプラント体にフィットさせるためにラッチリーマーで形成してください。先端部の骨質が硬くラッチリーマーで削合できない場合は、トレフィンバーの利用をお勧めします。

オーギュメーターの挿入がインプラント長まで達しない場合、側面部に刃が付与されていないトレフィンバーを使用すると骨頂部の裂開を防止できます。

トレフィンバーで採取した海綿骨は、インプラントショルダーに移植することもできます。

参考商品：K-SYSTEM KS3.2mm セット
 販 売：(株)メディカルエイペックス
 価 格：58,500 円（税抜き）

◇ブレード着脱には、専用ドライバーがあると便利です。
 商品名：ドライバー 価格：3,000 円（税抜き）

インプラント長まで挿入できない場合、骨頂部のみ拡大してインプラント長まではトレフィンバーをご利用ください。

無注水による削合ができますので、採取した骨を使用することも可能です。

