


スプラインインプラント ツイストタイプ					
	ファイナル OAM 径 ファイナルドリル相応	骨頂部皮質骨が硬い場合 カウンターシンク相応	タップ形成	ファイナルドリルを使用 しない場合の、OAM 深度	備考
◆3.75/8～	OAM φ 3.2 or φ 3.4	OAM φ 4.0 深度 5mm（骨頂部 1mm）	適宜	インプメント長+3mm	ファイナルドリルを使用せずにセルフタップで埋入するには、インプラント長+3mm の作業長にしてください。
◆5.0/8～	OAM φ 4.4 or φ 4.6	OAM φ 5.0 深度 5mm（骨頂部 1mm）	適宜	インプメント長+3mm	同上
スプラインインプラント シリンダータイプ					
◆3.25/8～	OAM φ 3.2	—	—	インプメント長+2mm	ファイナルドリルを使用せずにセルフタップで埋入するには、インプラント長+2mm の作業長にしてください。
◆4.0/8～	OAM φ 4.0	—	—	インプメント長+2mm	同上
◆5.0/8～	OAM φ 5.0	—	—	インプメント長+2mm	同上

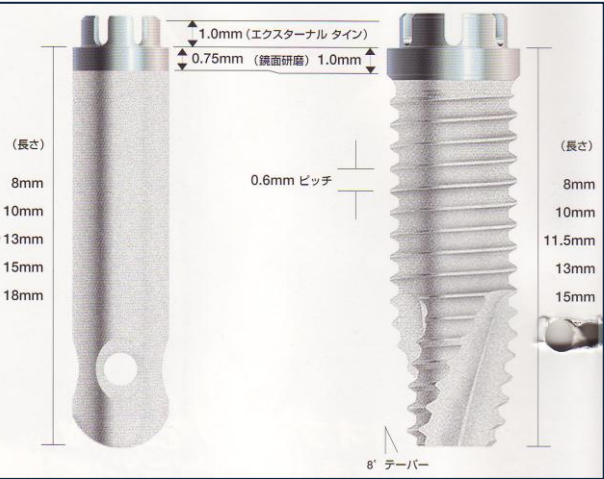

ツイストタイプの場合、軸面（ネジ山）よりもカラー部の直径が大きいため、骨頂部付近（深度 1mm）の拡大が必要です。
φ 4.0 が無い場合には、φ 3.6、φ 3.8 をジャグリング（独楽が倒れる動き）させて拡大してください。

シリンダータイプでは、軸面とカラー部が同径のため、その必要はありません。

各ドリルを使用する際に、拡大した骨頂部の裂開防止にはマニュアルドライバー（※1）の使用をお勧めします。
ただし、ツイストタイプの先端部は平面のためマニュアルドライバーでは硬くて形成ができない場合もあります。
その場合には側面部に刃が付与されていない、トレフィンバー（※2）を使用すると骨頂部の裂開が防止できます。

参考商品（詳細はお問合わせください。）

※1

商品名：2 次オペ用ボーンカウンターツールマニュアルドライバー

販 売：白鵬 価 格：9,200 円（参考価格）

※2

商品名：K-SYSTEM KS3.2mm セット

販 売：(株)メディカルエイペックス

価 格：58,500 円（税抜き）

◇ブレード着脱には、専用ドライバーがあると便利です。

商品名：ドライバー 価格：3,000 円（税抜き）

インプラント長まで挿入できない場合、骨頂部のみ拡大してインプラント長まではトレフィンバーをご利用ください。
無注水による削合ができますので、採取した骨を使用することも可能です。

当資料は(株)メディカルエイペックスが外科マニュアル、ユーザーからの情報を基に作成いたしました。